

Vocastim



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

VocaSTIM®-Master es la versión clínica con todas las funciones diagnósticas, de tratamiento, control y memoria, para un diagnóstico rápido y automatizado, y la determinación del programa de terapia; posiblemente con la ayuda del índice de indicaciones (propuestas de tratamiento para las indicaciones individuales y grados de daños, incluyendo imágenes para la aplicación de los electrodos). Los parámetros de tratamiento se almacenan en el vocaCARD, que, al mismo tiempo,

vocaSTIM® es el concepto de tratamiento eficiente para el diagnóstico, el tratamiento, el control del proceso de tratamiento y el entrenamiento autónomo de la voz /el tratamiento autónomo del paciente.

Tratamiento de estimulación NMEPS y NMEAS normalizado, según el Prof. Pahn

Las estimulaciones NMEPS y NMEAS se basan en la técnica de electroestimulación de los denominados ejercicios intencionales. Esta técnica combina el intento de desencadenar una contracción voluntaria (aquí: ejercicios funcionales de fonación y articulación según el Prof. Pahn, desde CD) con el desencadenamiento manual de la electroestimulación mediante una clave de liberación manual. Los ejercicios funcionales óptimos y los parámetros de corriente correspondientes se seleccionan de acuerdo con la indicación y el grado de daños, que se determinan mediante un procedimiento diagnóstico inicialmente y durante el control del progreso del tratamiento. El tratamiento se puede llevar a cabo en el paciente hospitalizado o bien de forma autónoma por el paciente en su propia casa



